

AUDISPRAY ADULT – Produit 100% naturel

AUDISPRAY ADULT contient une solution d'eau de mer hypertonique et microbiologiquement contrôlée. AUDISPRAY ADULT évite l'utilisation du coton-tige qui pousse le cérumen vers le tympan.

A quoi sert AUDISPRAY ADULT ?

AUDISPRAY ADULT ramollit et dissout le cérumen, facilitant ainsi son évacuation naturelle vers l'extérieur. Utilisé régulièrement AUDISPRAY ADULT prévient l'accumulation de cérumen et d'impuretés dans le conduit auditif. AUDISPRAY ADULT, sans gaz propulseur et muni d'un embout anti-surpresseur, permet une hygiène régulière, efficace et sans risque.

Qui peut utiliser AUDISPRAY ADULT ?

A partir de 12 ans : de 1 à 2 brumisations par oreille, 2 à 3 fois par semaine.

Les personnes produisant beaucoup de cérumen peuvent utiliser AUDISPRAY ADULT tous les jours.

Les porteurs d'appareils auditifs, pour qui l'utilisation d'AUDISPRAY ADULT est recommandé tous les soirs après avoir retiré les prothèses afin d'éviter que le cérumen ne provoque le dysfonctionnement des appareils auditifs.

Comment utiliser votre AUDISPRAY ADULT ?

1. Orienter l'embout vers l'oreille et procéder à 1 à 2 brumisations par oreille en maintenant le flacon en position verticale.
2. Masser la base de l'oreille pendant quelques secondes.
3. Incliner la tête sur le côté pour évacuer le surplus et essuyer.
4. Rincer l'embout à l'eau chaude après chaque utilisation.

Contre – Indications

Ne pas utiliser en cas d'otite, de perforation tympanique et de manière générale chez toute personne ayant ou ayant eu des antécédents médicaux (vertiges, interventions médicales ou chirurgicales...)

Précautions d'emploi

En cas de doute ou de douleurs préalables à l'utilisation du produit, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. En cas de bouchon de cérumen déjà formé, AUDISPRAY ADULT peut entraîner un gonflement du bouchon occasionnant une gêne. Dans ce cas, veuillez consulter votre médecin.

Il est recommandé d'utiliser AUDISPRAY ADULT dans l'année qui suit la première utilisation du flacon. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage et le flacon.

AUDISPRAY ADULT est un Dispositif Médical conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
France – Tel : +33 1 45 72 36 39 | E-mail : france@diepharmex.com

AUDISPRAY ADULT – Ein 100 % natürliches Produkt

AUDISPRAY ADULT enthält eine hypertonische, mikrobiologisch kontrollierte Meerwasserlösung. Mit AUDISPRAY ADULT kann die Verwendung von Wattestäbchen vermieden werden, die das Ohrenschmalz zum Trommelfell schieben.

Wozu dient AUDISPRAY ADULT ?

AUDISPRAY ADULT weicht und löst das Ohrenschmalz auf und unterstützt die natürliche Ausscheidung nach aussen. Eine regelmäßige Anwendung von AUDISPRAY ADULT beugt der Ansammlung von Ohrenschmalz und Verunreinigungen im Gehörgang vor. AUDISPRAY ADULT ohne Treibgas und mit Überdruckschutz am Sprühkopf ermöglicht eine regelmäßige, wirksame und ungefährliche Ohrenreinigung.

Wer kann AUDISPRAY ADULT verwenden?

Jugendliche und Erwachsene ab 12 Jahren: ein bis zwei Anwendungen pro Ohr, zwei bis drei Mal wöchentlich.

Menschen mit übermäßiger Cerumenproduktion können AUDISPRAY ADULT täglich anwenden.

Hörgeräteträgern wird empfohlen, AUDISPRAY ADULT jeden Abend nach dem Entfernen des Hörgerätes anzuwenden, damit das Cerumen die Funktionsfähigkeit des Hörgerätes nicht beeinträchtigt.

Wie wird AUDISPRAY ADULT angewendet?

1. Halten Sie den Sprühkopf ans Ohr und sprühen Sie in jedes Ohr ein bis zwei Mal. Halten Sie die Sprühflasche dabei aufrecht.
2. Massieren Sie den Ohrenansatz einige Sekunden lang.
3. Neigen Sie den Kopf zur Seite, damit die Restflüssigkeit herausläuft und wischen diese ab.
4. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit heissem Wasser ab.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Mittelohrentzündung, Trommelfellperforation und im Allgemeinen bei Menschen mit medizinischer Vorgeschichte (Schwindel, medizinische oder chirurgische Eingriffe ...)

Sicherheitshinweise zum Gebrauch

Wenden Sie sich bei Fragen oder Schmerzen vor dem Gebrauch des Produkts an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn sich bereits ein Ceruminalpfropfen gebildet hat, kann der Pfropf durch die Einwirkung von AUDISPRAY ADULT aufquellen und Schmerzen verursachen. Suchen Sie in diesem Fall bitte Ihren Arzt auf. Es wird empfohlen, AUDISPRAY ADULT spätestens ein Jahr nach der ersten Anwendung aufzubrauchen. Überschreiten Sie nicht das auf der Verpackung und der Sprühflasche angegebene Verfalldatum.

AUDISPRAY ADULT ist ein Medizinprodukt gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG
Deutschland – Tel: +41 22 718 64 20 | E-mail: deutschland@diepharmex.com